

instant ice pack - 09 125 0802

Le Vulkan ice pack apporte une source froide instantanée.
Ne nécessite pas d'être congelé au préalable.



Utilisation :

Localisez la poche intérieure et compressez la fermement pour la percer. Secouez pour mélanger le contenu.

ICE-PACK est maintenant prêt à être utilisé.
Voir la méthode ci-dessous.




Comprimez fermement la poche pour la percer



Mélangez le contenu



Appliquez le produit sur la blessure

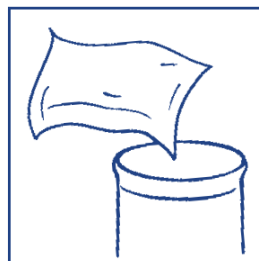

Jetez-le

Repos, Froid, Compression et Élévation

- La cryothérapie est désormais reconnue comme étant la meilleure méthode de traitement en phase aiguë d'une blessure, il favorise une diminution de l'hémorragie et de l'œdème suite à un traumatisme.
- Ice-pack doit être utilisé pendant un traitement général qui demande du repos, du froid associé à la compression puis à l'élévation de la partie blessée. Cela soulage de la douleur mais réduit également le gonflement et l'inflammation de la partie traitée.
- Cette méthode permet d'accélérer la récupération d'une blessure.

Ice-Pack – Premiers secours

- Ice-Pack doit être activé et appliqué sur la blessure aussi vite que possible. Ne pas appliquer le Pack directement sur la peau mais utiliser une serviette propre ou un tissu de la même épaisseur afin de prévenir des engelures.
- Le pack doit être appliqué avec une certaine compression sans pour autant couper la circulation du sang. Maintenez donc le produit compressé sur la blessure à l'aide d'un bandage. Vérifiez régulièrement que la circulation du sang n'est pas coupée.
- Elevez la partie blessée au dessus du niveau du cœur et laissez-la au repos.
- Ice-Pack doit être appliqué jusqu'à 12 minutes. Répétez l'opération toutes les deux heures durant les 24 premières heures après la blessure.

Avertissements

- **NE JAMAIS PERFORER L'ICE-PACK.** Pour un usage en extérieur uniquement.
- Si le contenu est avalé, donnez à la personne plusieurs verres d'eau ou de lait afin de l'aider à régurgiter le produit. Contactez immédiatement une assistance médicale.
- Si le contenu rentre en contact avec les yeux ou une plaie ouverte, rincez abondamment avec de l'eau et demandez une assistance médicale si nécessaire.
- Conservez hors de portée des enfants.
- Ne stockez pas le produit à des températures en dessous de 0°C.
- Utilisez avec une précaution particulière sur la tête, sur les enfants, les personnes diabétiques et les personnes avec une faible circulation sanguine ou présentant une anomalie du collagène.

Ingrédients

- Eau et Urée